


inomed サクシヨンプローブ

An all-in-one disposable surgical suction tube and stimulation probe

» Mapping Suction Probe

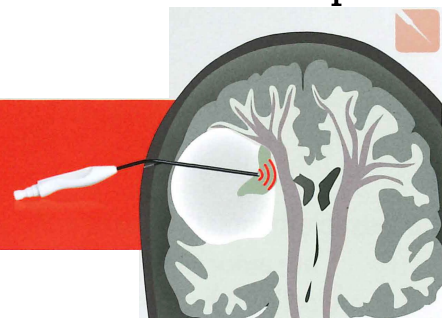

inomed 

» マッピング・サクシヨン・プローブ：多彩な応用分野

マッピングサクシヨンプローブは、脳神経外科、耳鼻咽喉科、血管外科、形成外科、顎顔面外科など、幅広い用途で利用できるオールラウンダーと考えています。

» 脳の安全な腫瘍切除を簡略化する新しいマッピング法


ダイナモック連続皮質下マッピングは、脳内の腫瘍切除を安全に行うための新しい手法です。この新しいマッピング手法のために、Raabe教授(Inselspital Bern)と共同で、マッピング用吸引プローブを開発しました。手術用吸引管と刺激用プローブの組合せにより、腫瘍切除時の吸引と同時に、連続したマッピングが可能です。

皮質脊髄路のマッピング用吸引プローブは、連続ダイナミックマッピング法をはじめ、中枢・末梢神経系に於ける幅広い用途に使用することが可能です。

» 術中に刺激プローブと吸引管の持ち替えが不要

吸引と刺激用の標準的な接続と、吸引制御穴による吸引力の簡単な操作により、汎用的に使用できます。

製品番号 525650
プローブ 長 9.0cm先端径3.0mm
ケーブル 長 3000mm
一般名称 皮質電極
販売名 inomedサクシヨンプローブ
医療機器承認番号 30400BZX00226000

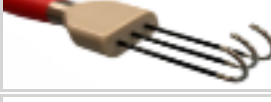inomed神経刺激プローブ (医療機器承認番号:30200ZX00341000)			
製品コード番号	先端長 cm	全長 cm	ケーブル長 3.0m DINピン 1.5mm
BCS 30° (バイポーラ)			
522 603	4.5	15.5	
522 601	9.0	19.5	
522 630	13.0	24.0	
522 627 *	23.0	34.0	
BCS ストレート (バイポーラ)			
522 600	9.0	19.5	
522 629	13.0	24.0	
BCS ベイオネット (バイポーラ)			
522 605 (30°)	13.0	24.0	
522 606	13.0	24.0	
マイクロフォーク			
522 610	4.5	15.5	
フォークball tip			
522 624	4.5	15.5	
バイポーラ ラテラル			
522 618	9.0	20.0	
フック			
522 625	2.2	13.2	
フック3極			
522 626	2.5	13.2	
モノポーラ 30°			
525 603	4.5	16.0	
525 600	9.0	20.0	
モノポーラ ストレート			
525 608	8.5	19.5	
モノポーラ ストレートball tip			
525 616	8.5	19.5	
モノポーラ ベイオネットball tip			
525 615	13.0	24.5	
モノポーラ ラスパトリー			
525 612	8.5	19.5	
* 一般的名称：皮下刺激用プローブ 販売名：inomed刺激プローブ 医療機器認証番号: 305AMBZX00001000			

誘発反応測定装置
術中モニタリングシステム
ISIS IOM
医療機器認証番号
230AMBZX00004000



誘発反応測定装置
術中モニタリングシステム
C2 Xplore
医療機器認証番号
303AMBZX00004000



製造元 **inomed**
inomed Medizintechnik GmbH
輸入・発売元 JPクリード株式会社
東京都台東区西浅草1-7-19
info@jpcreed.com
Tel:03-6912-1090

